


# ...en résumé

| Caractéristiques  | Bénéfices                                    |
|---|--|
| Broyage suivi de la mise en suspension de la poudre dans le même dispositif | Préparation rapide, facile et simplifiée     |
|   | Ni transfert, ni perte de substance          |
|   | Administration directe possible              |
|   | Prélèvement direct pour sonde possible       |
|   | Gain de temps                                |
| Confinement des poudres dans le dispositif                                  | Plus de sécurité                             |
|   | Posologie précise                            |
| Plastique transparent   | Protection du préparateur et du patient      |
|   | Contrôle visuel des étapes de la préparation |
| Entièrement démontable, lavable en machine                                  | Contrôle de la propreté du dispositif        |
|   | Facile à nettoyer                            |
| Plastique à usage médical approprié   | Sécurité, résiste à l'usure                  |
|   | Réutilisable                                 |

## MODE D'EMPLOI

1. Placer le comprimé à broyer dans le creuset du fond A.
2. Visser et dévisser le bouchon B, si nécessaire plusieurs fois, pour écraser le comprimé jusqu'à obtention d'une poudre fine.
3. Retirer le bouchon B et le placer retourné sur la table de préparation.
4. Adapter le corps C sur le fond A et visser de manière à assurer l'étanchéité.
5. Remplir l'ensemble A+C avec la solution de dispersion (p. ex. InOrpha®, ORA®) à l'aide du trait de jauge.
6. Adapter le bouchon B sur l'ensemble A+C et visser de manière à assurer l'étanchéité.
7. Mélanger par retournement jusqu'à obtention d'une solution/suspension homogène.
8. Retirer le bouchon B.
9. Administrer la solution/suspension ou utiliser une seringue de gavage pour prélever l'intégralité de la suspension directement dans l'ensemble A+C.
10. Nettoyer soigneusement à l'eau l'intégralité du dispositif en insistant sur les parties en contact avec le médicament. Sécher soigneusement.

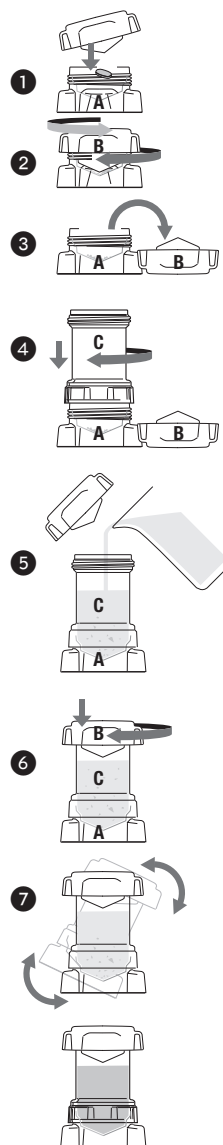

PillDrink®

## ...pour une suspension buvable, rapide, facile et sécurisée

Pour toute demande d'information complémentaire :

**INRESA**

1 rue Jean Monnet • F-68870 BARTENHEIM  
 Tél. : +33 (0)3 89 70 76 60 • Fax : +33 (0)3 89 70 78 65  
[www.inresa.fr](http://www.inresa.fr) • [info@inresa.fr](mailto:info@inresa.fr)